

# FIXIER- UND HALTE- GURTVORRICHTUNGEN FÜR BETTEN

Die auf ärztliche Verschreibung gelieferten Fixiervorrichtungen für Betten von WINN'SAVE® wurden speziell dafür entwickelt, die Bewegungsfreiheit von psychisch beeinträchtigten Personen einzuschränken, um Sturzgefahren zu vermeiden bzw. vorzubeugen, die Zeit rastlosen Umherwandelns zu begrenzen oder pflegerische Maßnahmen zu ermöglichen.

- **Wirksamkeit:** je nach erforderlicher Schutzstufe erweiterungsfähiges Konzept.  
Angenehmer, im Griff weicher Stoff.  
Erleichterte Anwendung durch integrierte Markierungen.  
Verstärkung der auf Zug belasteten Nähte.  
Langlebige Materialien (rostfreie Schnallen und Ösen)
- **Sicherheit:** "feuerhemmend" behandelte Stoffe.  
Kompatibilität mit thermischer und chemischer Desinfektion.  
Zwei Verschluss-Systeme nach Bedarf (Fixierung - magnetisch oder bei Haltfunktion – Schlaufe - )



## Fixierung und Rückhaltung im Bett

### • Bauch- und Schrittgurt

**Indikation:** mittelschwere Agitation mit Sturzgefahr.

**Eigenschaften:** Fixierung der bettlägerigen Person. Ermöglicht, die Arme und Beine zu bewegen, sich aufzusetzen und umzudrehen. Der Schrittgurt verhindert, dass der Patient nach unten rutscht.

**Gebrauchshinweise:** an den festen Teilen des Betts befestigen.

Vor der Bestellung Ihres Produktes Taillenumfang messen.

**Zusammensetzung:** Material Polyester: Feuerschutzbehandelt.

**Empfehlung:** Die Fixierung unterliegt ärztlicher Anordnung und ihr Nutzen ist nach 24 Stunden erneut zu prüfen.



### • 2 Handgelenksgurte (zur Befestigung am Bauchgurt)

**Indikation:** schwere Agitation mit Sturzgefahr: Agitation und/oder nicht beherrschbare körperliche Aggressivität.

**Eigenschaften:** Fixierung der bettlägerigen Person mittels längenverstellbarer Handgelenksgurte, um den Bewegungsradius der Arme zu verringern.

**Gebrauchshinweise:** die beiden Handgelenksgurte werden als Ergänzung zur Bauchfixierung mit Schrittgurt eingesetzt. Wird am Bauchgurt befestigt.

Einheitsgröße.

**Zusammensetzung:** Material Polyester: Feuerschutzbehandelt.

**Empfehlung:** Die Fixierung unterliegt ärztlicher Anordnung und ihr Nutzen ist nach 24 Stunden erneut zu prüfen.



### • 2 Handgelenksgurte für Befestigung an den festen Teilen des Betts

**Indikation:** schwere Agitation mit Sturzgefahr: Agitation und/oder nicht beherrschbare körperliche Aggressivität.


**Eigenschaften:** Fixierung der bettlägerigen Person mittels längenverstellbarer Handgelenksgurte, um den Bewegungsradius der Arme zu verringern.

**Gebrauchshinweise:** An den festen Teilen des Betts befestigen.

Erhältlich in Einheitsgröße.

**Zusammensetzung:** Material Polyester: Feuerschutzbehandelt.

**Empfehlung:** Die Fixierung unterliegt ärztlicher Anordnung und ihr Nutzen ist nach 24 Stunden erneut zu prüfen.

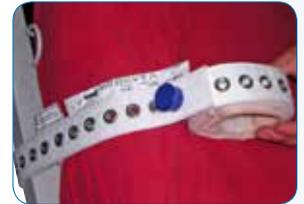

### • Schulter- und Thoraxgurt

**Indikation:** mittelschwere Agitation mit Sturzgefahr.

**Eigenschaften:** Fixierung der bettlägerigen Person.

**Gebrauchshinweise:** Der Schulter- und Thoraxgurt wird als Ergänzung zur Bauchfixierung mit Schrittgurt eingesetzt.

Schulter-Brustkorb-Bereich vor Bestellung Ihres Produktes ausmessen.

Möglichkeit zur Ergänzung mit Verlängerungszubehör für die Schulter-Thoraxgurte -.

**Zusammensetzung:** Material Polyester: Feuerschutzbehandelt.

**Empfehlung:** Die Fixierung unterliegt ärztlicher Anordnung und ihr Nutzen ist nach 24 Stunden erneut zu prüfen.



### • Universal-Gurte

**Indikation:** schwere Agitation mit Sturzgefahr: Agitation und/oder nicht beherrschbare körperliche Aggressivität.

**Gebrauchshinweise:** Erhältlich in Einheitsgröße.

**Zusammensetzung:** Material Polyester: Feuerschutzbehandelt.

**Empfehlung:** Die Fixierung unterliegt ärztlicher Anordnung und ihr Nutzen ist nach 24 Stunden erneut zu prüfen.



ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MASSE	VERSCHLUSS-SYSTEME	
			MAGNETISCH	VERSTELLBARE SCHLAUFE
VCBTLT002-10	Bauch- und Beckenfixierung am Bett mit Seitenbänder - (S)	45 - 85 cm*	x	
VCBTLT002-20	Bauch- und Beckenfixierung am Bett mit Seitenbänder - (M)	70 - 118 cm	x	
VCBTLT002-21	Bauch- und Beckenfixierung am Bett ohne Seitenbändern - (M)	70 - 118 cm	x	
VCBTLT002-30	Bauch- und Beckenfixierung am Bett mit Seitenbänder - (L)	94 - 158 cm	x	
VCBTLT002-31	Bauch- und Beckenfixierung am Bett ohne Seitenbändern - (L)	94 - 158 cm	x	
VCBTLT003-01	Option Betttraverse für Fußgurte	-	x	
VCBTLT004-01	Verlängerung Thorax-Gurt	-	x	
VCBTLT004-20	Thoraxgurt-Fixierung - (M)	20 - 50 cm	x	
VCBTLT006-00	Fixierung Universalgurte für Handgelenke und Knöchel (x2)	5 - 40 cm**	x	
VCBTLT011-00	Handgurt-Fixierung Einheitsgröße (x2)	10 - 30 cm	x	
VCNTLT007-00	Universal-Haltegurt mit Schlaufe (x2)	5 - 40 cm**		x
VCBTLT010-10	Bauch-Haltegurt (Schlaufen, Klettverschluss) - (S)	45 - 85 cm		x
VCBTLT010-20	Bauch-Haltegurt (Schlaufen, Klettverschluss) - (M)	65 - 85 cm		x
VCBTLT010-30	Bauch-Haltegurt (Schlaufen, Klettverschluss) - (L)	85 - 120 cm		x

\* Maß entsprechend Taillenumfang

\*\* Maß entsprechend Knöchel- und Handgelenksumfang

1 Jahr Garantie



**ASKLÉ SANTÉ Groupe WinnCare** – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 Frankreich  
Tel.: +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax: +33 (0)4 66 02 15 28 – E-Mail: [contact@askle.com](mailto:contact@askle.com)

[www.winnicare.fr](http://www.winnicare.fr)



**WINN CARE**  
g r o u p e

by

**ASKLÉSANTÉ**