

WIN  CARE



Luna IPx4

Lève-personnes sur
rail

Manuel d'utilisation

Information importante!

Ce manuel doit être lu avant
l'utilisation de l'appareil.

Ce manuel d'utilisation est destiné
aux techniciens, installateurs,
personnel soignants et tout autre
personnel directement lié à
l'utilisation ou à la maintenance du
lève-personnes sur rail.

Date: 04-10-2021

Ver: 7



Scannez le QR code pour de plus
amples renseignements

SOMMAIRE

1	DESCRIPTIF, SECURITE ET UTILISATION	4
1.1	Descriptif	4
1.2	Performances essentielles	4
1.3	Instructions de sécurité	4
1.4	Avant de procéder à l'utilisation	5
1.5	Terminologie	6
1.6	Déballage	7
1.7	Transport	7
2	INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT	7
2.1	Installation et démontage du lève-personnes fixé au plafond	7
2.2	Installation et désinstallation du cintre de levage	10
2.3	Pictogrammes et fonctions	11
2.4	Utilisation	12
2.5	Fonctions de sécurité	12
2.6	Charge	14
3	UTILISATION DU LUNA	15
3.1	Utilisation des harnais de levage	15
3.2	Transfert de pièce à pièce	16
3.3	Utilisation du LUNA dans une pièce d'eau	17
4	MAINTENANCE	18
4.1	Nettoyage	18
4.2	Stockage	18
5	VERIFICATION, GARANTIE ET SOLUTIONS AUX PROBLEMES	19
5.1	Vérification annuelle et Garantie	19
5.2	Solutions aux problèmes	19
6	DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSION	20
6.1	Données techniques	20
6.2	Dimensions	21
7	ENVIRONNEMENT ET QUALITE	22
7.1	Estimation de la durée de vie	22
7.2	Recyclage	22
7.3	Batterie	22
7.4	Qualité	22
7.5	Symboles et abréviations	22
8	Accessoires	23
9	Données CEM	24

1 DESCRIPTIF, SECURITE ET UTILISATION

1.1 Descriptif

Le LunaIPx4, ci-après dénommé Luna dans le présent manuel d'utilisation, se décline en plusieurs modèles. Lève-personnes Luna : un transfert de personne flexible. 1 module unique pour 2 utilisations différentes. Compatibles avec des accessoires tels que le chariot de transport Luna Mover. Sauf indication contraire, les descriptions fournies dans ce manuel sont valables pour l'ensemble des modèles.

Le lève-personnes au plafond Luna permet de transférer des patients de leur lit à un fauteuil/fauteuil roulant. Il est conçu pour être utilisé dans les maisons de retraites médicalisées, les hôpitaux et les centres de soin, mais également dans le cadre de soins à domicile. Le LUNA peut être utilisé de manière permanente ou occasionnelle sur un système de monorail ou sur système de couverture totale (Rail en H). Le produit peut être facilement transmis à un nouvel utilisateur après un nettoyage approfondi (voir 4.1).

1.2 Performances essentielles

Usage prévu: Fonctions montée et descente du patient.

Le système Luna permet de réduire le poids du soigné grâce au bouton d'abaissement d'urgence en cas de phénomènes continus d'interférences électriques.

1.3 Instructions de sécurité



Important – Avertissement!

Ce manuel d'utilisation doit être lu avant la mise en service du LUNA.

- Toutes les pièces doivent être mises en place conformément à ce manuel d'utilisation.
- Il ne doit y avoir aucune trace d'usure sur les rails, les sangles ou sur les harnais.
- NE JAMAIS effectuer de levage si vous soupçonnez un défaut (bruit anormal etc.). Dans ce cas mettez l'appareil hors service et prévenez immédiatement le S.A.V.
- La capacité de levage est de 200kg ou 275kg et ne doit jamais être dépassée. Lorsque vous utilisez le lève-personne mobile avec d'autres accessoires (harnais par exemple), l'accessoire utilisé pour déterminer la capacité de levage maximum est toujours celui qui présente la PLUS FAIBLE capacité de levage.
- Vérifier que le Luna ou le cintre de levage n'entre pas en contact avec l'utilisateur lorsque le harnais est installé sur le cintre de levage.
- Un soignant doit toujours superviser l'utilisation du système.
- S'assurer que ni le patient ni le soignant ne peuvent être blessé pendant les opérations de levage.
- Ne jamais lever plus haut que nécessaire.
- Conformité CEM Les interférences électriques provenant d'équipements de communication RF portables, y compris les antennes, peuvent affecter les équipements médicaux électriques et ne doivent pas être utilisées à moins de 30 cm (12 pouces) du système Luna IPx4.

1.4 Avant de procéder à l'utilisation

Avant d'utiliser le LUNA, lisez attentivement les instructions suivantes:


- Le personnel doit être formé à l'utilisation du LUNA.
- Le LUNA doit être utilisé sur des rails ou des rails approuvés par Winncare.
- Les rails doivent être installés par des techniciens qualifiés Winncare.
- Le LUNA ne peut être équipé que de matériels conçus par Winncare.
- Les harnais Winncare ont été conçus pour une utilisation sur le LUNA, référez-vous au catalogue des harnais pour tout complément d'information.
- Le LUNA est prévu pour être utilisé en intérieur à des températures comprises entre +2°C et +40°C et une humidité relative (40-90%).
- Si le Luna est utilisé à proximité de systèmes de douche ou de baignoire, vous devez impérativement vous assurer que l'appareil lui-même ou sa télécommande n'est pas immergé(e) (voir section 3.3).
- Utilisation dans des environnements chimiques agressifs (voir section 5.1).

Contrôles de sécurité:


- Contrôle du niveau d'usure ou de la détérioration de la sangle de levage du Luna. En cas de défaut, le Luna doit immédiatement être réparé.
- Assurez-vous que l'arrêt d'urgence n'est pas activé. Si le voyant rouge est allumé, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour déclencher l'arrêt d'urgence.
- Contrôle de la fonction de montée/descente. En cas de bruit anormal, le Luna ne doit pas être utilisé avant d'avoir été contrôlé par un technicien qualifié.
- Lors du contrôle de la fonction de montée/descente, assurez-vous également que la sangle n'est pas pliée ou entortillée. Contrôlez également que la sangle du Luna bouge librement.
- Les harnais doivent être régulièrement contrôlés. Les harnais ne doivent pas être utilisés si des défauts sont observés.
- En cas de doute sur l'utilisation le LUNA, contactez Winncare pour obtenir des conseils et des recommandations.

1.5 Terminologie


Montage du Luna sur la sangle

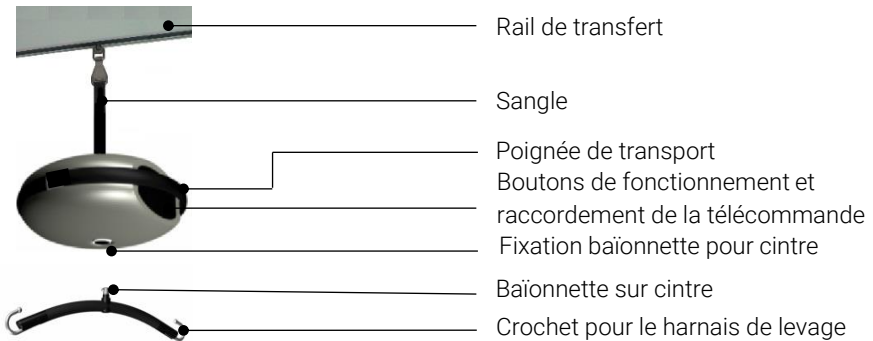

Montage du Luna sur le rail

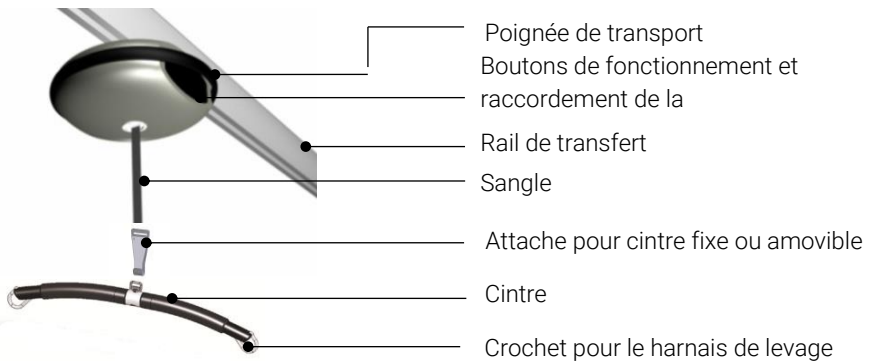

Luna SKY monté directement sur rail :

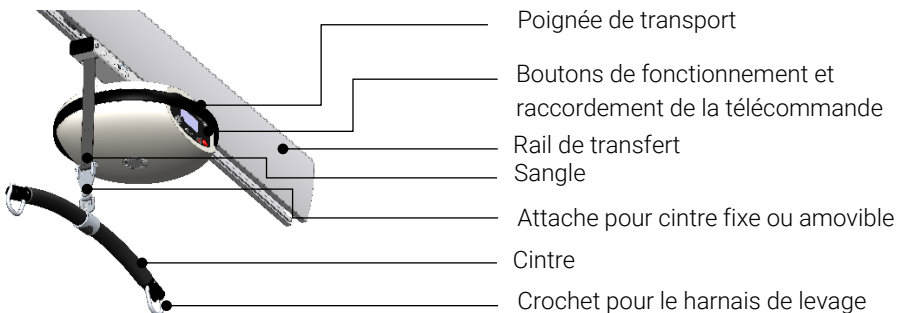

1.6 Déballage

Vérifiez que tous les éléments sont présents et non endommagés. Toute suspicion de dommages doit être reportée à votre représentant.

Nous vous recommandons de conserver l'emballage du Luna s'il doit être déplacé sur un autre site ou retourné à la fabrication.

Contenu:

- Moteur Luna
- Manuel d'utilisation
- Télécommande (accessoires)
- Cintre (accessoires)
- Chargeur (accessoires)
- Chariots à roulettes (uniquement pour Luna SKY)



1.7 Transport

Le Luna sera transporté de façon plus sûre dans son emballage d'origine. Des symboles sont imprimés sur l'emballage afin de transmettre les informations de précautions aux transporteurs.

2 INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT

2.1 Installation et démontage du lève-personnes fixé au plafond

Le LUNA peut être installé de différentes façons selon vos besoins (La configuration est décidée entre l'acheteur et Winncare.

Le module Luna est conçu pour être mis en place selon les modes suivants:



Soyez vigilant lorsque vous retirez le Luna, car son poids est de 6.7 kg. Luna SKY 7.4 kg.

A) Position fixe décrochable

Le Luna est directement monté sur le rail. Il reste facilement déplaçable par le personnel technique, sans outils. Un galet de roulement est utilisé pour recevoir le moteur et ainsi le déplacer sans difficulté. Le galet de roulement dispose d'une accroche baïonnette pour fixer le Luna (Fig. 2.1A).

- 1) Insérer la baïonnette dans le moteur (vous sentirez une résistance car le support est à ressort).
- 2) Tournez le Luna à 90°degrés (vers la droite).
Quand le Luna est en place, un clic indique que le moteur est correctement enclenché.

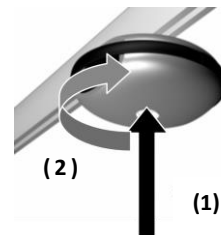


Fig. 2.1A



Si le Luna n'est pas fixé correctement une sécurité électronique vous empêche de l'utiliser.

Comment retirer le Luna du rail

- 1) Appuyez le LUNA contre le galet à baïonnette (l'unité est à ressort).
- 2) Faites pivoter le Luna de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le retirer.

B) Position portable (Nomade)

La sangle et le crochet de fixation sont déjà fixés à la cassette Luna. (Figure 2.1B)

- 1) Pour installer le Luna, reliez la sangle et le crochet à ressort au chariot du rail.
- 2) Insérez le crochet dans le support du chariot et tirez vers le bas jusqu'à ce que le crochet soit en place dans le support.

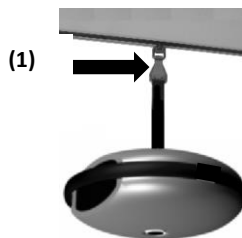



Fig. 2.1B



Vérifiez que le crochet est correctement fixé.

Démontage du Luna et de la sangle:

- 1) Le crochet peut être retiré à l'aide d'une perche.
- 2) La perche est positionnée dans la partie inférieure du crochet.
- 3) Déplacez la perche jusqu'à la partie à ressort du crochet et décrochez la cassette Luna du chariot.
- 4) Abaissez le Luna sur le support du chariot de transport tout en veillant à ce que la sangle soit légèrement relâchée.

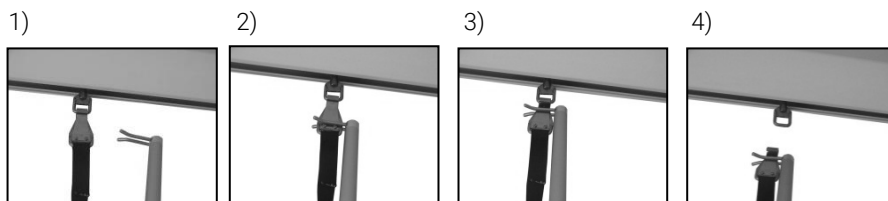


La perche et le chariot de transport peuvent être achetés directement chez Winnicare ou chez votre revendeur local.

Les références de commande sont disponibles à la section 8, «Accessoires»

C) Luna SKY montée sur le rail

Le lève-personne plafonnier Luna SKY est monté directement sur le rail avec deux chariots à roulettes. Chaque chariot a son propre bloc de montage qui doit être placé dans le tube carré Luna SKY et bien être bien serré (Fig. 2.1C).


- 1) Montez les chariots dans le tube carré Luna SKY.
- 2) Montez le Luna SKY jusqu'au système de rails Luna SKY et poussez les deux chariots avec le bloc de montage dans chaque extrémité du système de rails.
- 3) Montez les quatre vis avec les rondelles Nord-lock et serrer à 8 Nm.
- 4) Lorsque vous démontez Luna SKY du système de rails, la procédure doit être réalisée dans l'ordre inverse.

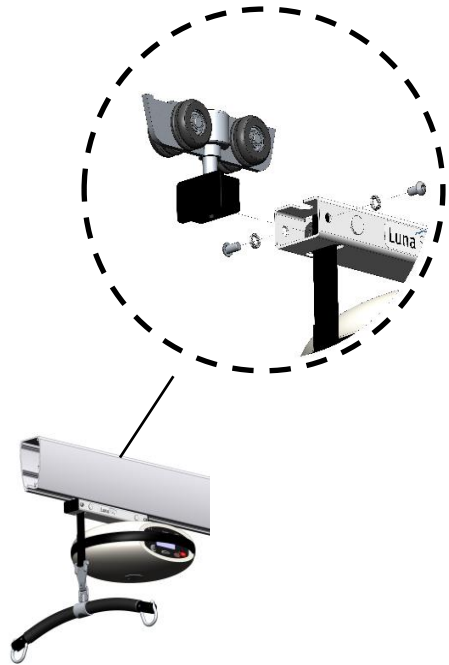

Les rondelles Nord-lock doivent toujours être utilisées lors du montage des chariots à roulettes au Luna SKY.

D) Installation d'une pièce à l'autre avec deux lève-personnes plafonnier Luna SKY

Remarque: Lorsque vous utilisez Luna SKY pour le transfert d'une pièce à l'autre, la sortie de la sangle des deux Luna SKY doit être tournée l'une vers l'autre comme indiqué ci-dessous:

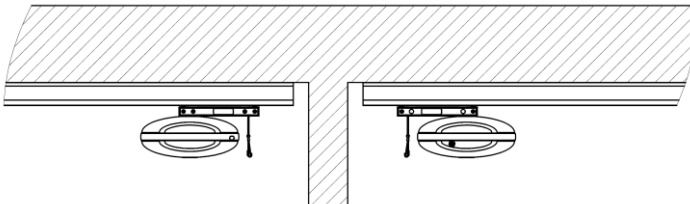

Remarque: Le transfert peut également être effectué avec un lève-personne plafonnier Luna et un lève-personne plafonnier Luna SKY.

2.2 Installation et désinstallation du cintre de levage

En fonction de la méthode d'installation de la cassette Luna, procédez de l'une des façons suivantes pour installer le cintre de levage:



A) Luna en position fixe décrochable

Installation du cintre de levage (Fig. 2.2A)

- 1) Soulevez le cintre de levage jusqu'à la sangle, puis appuyez sur le crochet à ressort.
- 2) Placez le crochet à ressort de la sangle dans l'anneau. Tirez vers le haut jusqu'à ce que le crochet soit fixé sur l'anneau du cintre de levage.
- 3) Vérifiez que le crochet est correctement fixé.



Fig. 2.2A

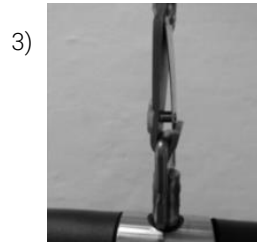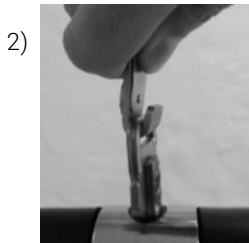

Désinstallation du cintre de levage

- 1) Appuyez sur le verrou à ressort du crochet.
- 2) Faites basculer le crochet et enlevez-le de l'anneau du cintre.

B) Luna en position nomade

- 1) Mettez la baïonnette du cintre dans la cassette Luna. Vous sentirez une résistance due à la présence de ressort.
- 2) Faites tourner le cintre à 90° (Fig. 2.2B) dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois le cintre de levage en place, un clic est émis pour indiquer que l'installation a été correctement effectuée.

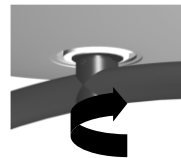


Fig. 2.2B



Si le cintre de levage n'est pas correctement installé, un dispositif électronique de sécurité empêche l'appareil de fonctionner.

Désinstallation du cintre de levage

- 1) Appuyez sur le cintre
- 2) Faites pivoter le cintre de levage à 90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le désinstaller.

2.3 Pictogrammes et fonctions

(1) ON – Si la LED est éteinte, le Luna est en mode «veille». La LED s'allume lorsque vous appuyez sur le bouton Montée **(4)** ou Descente **(3)** de la télécommande ou du module de levage.

(2) BATT. – Indication de l'état de la batterie (voir section 2.6).

(3)+(4) Montée/Descente – de chaque côté de la cassette - Exercez une pression constante sur ces boutons pour déplacer le Luna dans la direction de votre choix. Relâchez le bouton pour stopper.

Remarque: Fonctionne uniquement si la télécommande **(5)** est branchée et si la LED **(1)** est allumée.

(5) Prise – Pour brancher la fiche de la télécommande.

(6) Données d'entretien – Affiche les informations relatives au modèle, au numéro de série et aux symboles du Luna.

(7) Descente D'urgence – Utilisé UNIQUEMENT dans les situations où il est nécessaire d'abaisser un patient en toute sécurité si le lève-personnes ne suffit pas. Cette touche doit être maintenue enfoncée en permanence pour abaisser l'appareil. (Voir section 2.5)

Remarque: Fonctionne uniquement si la télécommande **(5)** est branchée et si la LED **(1)** est allumée.


(8) STOP / Arrêt D'urgence – Appuyez sur le bouton d'arrêt d'urgence pour stopper immédiatement le Luna. Pour réinitialiser cette fonction, appuyez sur le bouton de réinitialisation de la télécommande pendant 5 secondes.

(9) Reset/Remettre – Permet de réinitialiser le Luna après avoir utilisé la fonction d'arrêt d'urgence ou de verrouillage. Pour réactiver le Luna, appuyez sur le bouton de réinitialisation de la télécommande pendant 5 secondes.


La fonction de réinitialisation permet également de verrouiller l'ensemble des fonctions afin d'empêcher leur utilisation (par le patient par exemple). Si une pression est exercée sur le bouton de réinitialisation, la LED devient rouge et toutes les fonctions sont verrouillées. Pour désactiver cette fonction, suivez la même procédure qu'après un arrêt d'urgence.

10) Option – Cette option n'est pas disponible sur une commande manuelle standard. Pour un résultat optimal, utiliser le chariot de transport Luna Mover ou une barre de maintien électrique.

Panneau latéral:

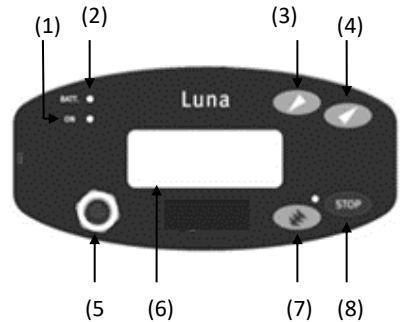

Télécommande:

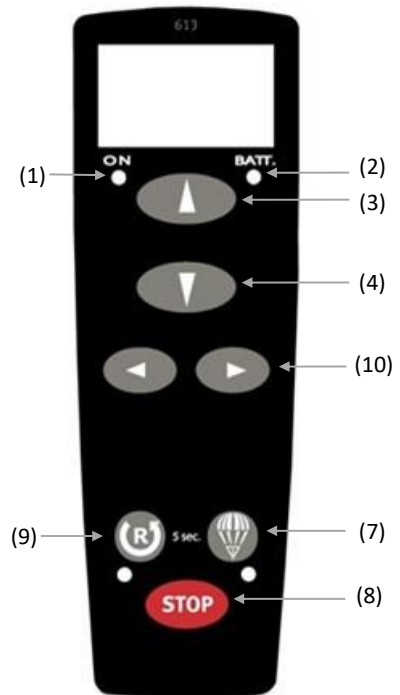

2.4 Utilisation

Le Luna est prêt à être utilisé lorsque la cassette Luna et le cintre de levage sont correctement installés. Lorsque la commande manuelle est branchée à l'entrée du connecteur sur le panneau avant, le système Luna peut démarrer en mode arrêt d'urgence. Pour relâcher l'arrêt d'urgence, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Testez les fonctions haut et bas avant d'utiliser le dispositif Luna.

Lorsqu'il est à vide, le Luna se déplace plus rapidement afin d'atteindre le patient rapidement. Lorsque le patient est levé, la vitesse est automatiquement réduite pour un confort et une sécurité accrus.

2.5 Fonctions de sécurité

Arrêt d'Urgence:

Cette fonction ne doit être utilisée qu'en cas d'urgence. Exemple: Si le Luna ne réagit plus ou ne s'arrête pas après avoir relâché un des boutons de montée ou descente de la télécommande. La fonction d'arrêt d'urgence est accessible à partir de la télécommande et du panneau latéral. Lorsqu'elle est activée, toutes les fonctions s'arrêtent automatiquement et la LED de la télécommande devient rouge.

Le Luna peut être réactivé en maintenant le bouton pendant 5 secondes.

Bouton descente d'urgence:

L'abaissement d'urgence ne doit être utilisé qu'en cas d'urgence lorsqu'il est nécessaire d'abaisser un patient en toute sécurité. Le bouton d'abaissement d'urgence se trouve sur la commande manuelle, représenté par un parachute et sur le revêtement latéral, avec 3 flèches pointant vers le bas. Pour activer l'abaissement d'urgence, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande ou sur le revêtement latéral pendant 5 secondes. Le dispositif continue à émettre un bip lorsque le bouton est maintenu enfoncé. Après 5 secondes, l'abaissement du patient est activé. Le bouton doit être maintenu enfoncé pour poursuivre l'abaissement du patient.

Remarque: Sur certains modèles, l'abaissement d'urgence fonctionne même si la commande manuelle présente un défaut. Essayez plutôt d'utiliser le bouton sur le panneau avant. Si aucun des deux ne fonctionne, utilisez la fonction d'abaissement d'urgence manuelle décrite dans le paragraphe suivant.



Le Luna système doit être actif avant de procéder à l'abaissement d'urgence. Appuyez d'abord sur le bouton haut ou bas.

La butée inférieure n'est pas active lorsque l'abaissement d'urgence est utilisé. Relâchez le bouton d'abaissement d'urgence avant que la sangle ne soit au maximum de sa longueur.

Descente d'urgence manuelle:

La descente d'urgence manuelle doit être utilisée pour descendre le patient si la descente d'urgence électrique est en panne ou si la télécommande est défectueuse.

Suivez les instructions indiquées sur le chargeur ou suivez les instructions ci-dessous.

Fig. 1) Enlever la télécommande.

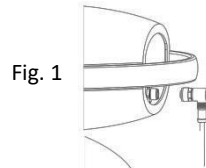


Fig. 2) Enlever le capuchon sur le côté du Luna.

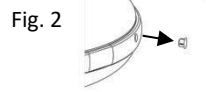


Fig. 3) Prenez la clé qui est placée au-dessus du chargeur, insérez-la dans le logement prévu à cet effet et tournez la clé dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.



Remarque: Scanner le QR-code et suivez les instructions de la vidéo.



Si la fonction d'arrêt ou de descente d'urgence a été activée, veuillez noter que le Luna ne doit pas être utilisé à nouveau avant qu'un contrôle n'ait été effectué et que les réparations nécessaires n'aient été réalisées.

En cas de doute contactez Winnicare.

2.6 Charge

Le Luna peut être rechargé en utilisant soit le chargeur mural soit la station de rechargement sur le chariot. Le chargeur est connecté au secteur.

Il y a environ ~80 lavages/100 kg par charge.

Remarque: Le Luna est équipé de batterie qui nécessite une recharge régulière. WinnCare recommande de recharger le Luna chaque nuit ou quand il n'est pas utilisé.

Le dispositif Luna est équipé d'une diode (marquée BATT.) sur la commande manuelle et le panneau avant où figurent les informations suivantes concernant l'état de la batterie pendant l'utilisation:

Diode couleur	Descriptif
Vert	<ul style="list-style-type: none">• Lorsque la charge commence, la LED de la télécommande et du panneau avant clignote.<ul style="list-style-type: none">◦ Après 2 minutes, le clignotement s'arrête, mais le système continue à charger.• Pour vérifier l'état de charge, il suffit de retirer et de réinsérer la télécommande dans le chargeur.<ul style="list-style-type: none">◦ Une lumière constante indique que le système est complètement chargé. La lumière s'éteint après 2 minutes. <p>Remarque: sur certains modèles, la lumière peut ne pas s'éteindre.</p>
Jaune	<ul style="list-style-type: none">• La LED de la cassette Luna s'allume et indique que la batterie est rechargée à 50%.• Le chargement est alors recommandé pour éviter le déchargement de la batterie.
Rouged	<ul style="list-style-type: none">• La LED de la cassette Luna s'allume et indique que la batterie a atteint un niveau de chargement critique.• La LED commence à clignoter et un signal sonore est émis.• Dans ce cas de figure, le Luna doit IMMÉDIATEMENT être rechargé et rester chargé pendant 5 heures.

Remarque: Le Luna ne peut pas être trop chargé.

3 UTILISATION DU LUNA

Le Luna est prêt à l'utilisation si toutes les instructions de montage ont été respectées.

Remarque: Les deux poignées de transport placées sur le lève-personnes Luna ne doivent être utilisées que pour l'installation/le transport.

3.1 Utilisation des harnais de levage

Le Luna est équipé d'un cintre qui a été conçu pour une utilisation avec des harnais Winnicare. Ils ont 2 à 6 boucles d'attaches et sont prévues pour les crochets de diamètre 8 mm.

L'usage d'autres harnais que ceux de Winnicare, dégagerait la responsabilité de Winnicare en cas d'accident.

Winnicare peut vous aider à choisir les harnais appropriés et à les utiliser correctement.

Accrochage des harnais au Winnicare cintre

Winnicare dégage toute responsabilité si le harnais n'est pas placé correctement. C'est à l'utilisateur de s'assurer que le harnais utilisé est adéquat, et correctement mis en place.

- 1) Sur un plan hygiénique, le crochet peut s'ouvrir/se fermer sans contact direct. Tenez la barre d'écartement d'une main et placez la sangle à boucle autour du crochet et tirez la sangle vers vous (Fig. 3.1A).
- 2) La boucle est placée dans le crochet en position ouverte (Fig 3.1B).
- 3) La boucle est tirée vers le bas afin de refermer le crochet (3.1C).



Fig. 3.1A

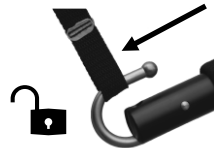


Fig. 3.1B



Fig. 3.1C

La crochets du cintre est conçu pour se fermer automatiquement sous le poids du patient.

Pour libérer le harnais, relevez la boucle vers le haut pour ouvrir le crochet.



Avertissement! Attention au risque de coincement des doigts.

3.2 Transfert de pièce à pièce


Vous disposez de deux méthodes pour déplacer un patient d'une pièce à l'autre. Afin de vous assurer que le transfert est effectué correctement et ne présente pas de risques pour le patient, suivez la procédure :

A) Transfert avec deux lève-personnes fixés au plafond Luna ou B) Transfert avec un lève-personnes fixé au plafond Luna.

A) Transfert avec deux moteurs LUNA

Remarque: Possible uniquement avec équipé d'un cintre de levage spécial.


- 1) Les Luna doivent être positionnés le plus près possible l'un de l'autre (a+b).
- 2) Le Luna (a) avec le patient est déplacé près de la porte puis la sangle du Luna (b) est tendue et accrochée à l'anneau supplémentaire sur le cintre.
- 3) Les deux cassettes Luna sont maintenant connectées au cintre de levage. Assurez-vous que le crochet est correctement installé.
- 4) La sangle de levage du Luna (a) est relâchée, tandis que celle du Luna (b) est tendue.
- 5) Quand la sangle du Luna (b) est à l'aplomb et tendue, le poids du patient est alors totalement pris en charge par ce Luna. La sangle de levage du Luna (a) peut maintenant être retirée en libérant le crochet à ressort du cintre de levage (il faut pour cela soulever le crochet, appuyer sur le ressort et retirer le crochet).
- 6) Le transfert peut continuer avec le Luna (b).

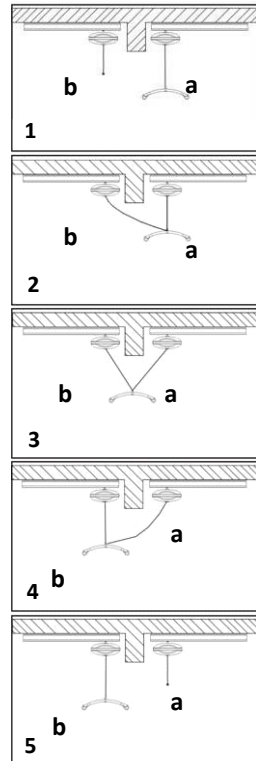

B) Transfert avec un seul Luna

Remarque: Possible uniquement avec équipé d'un cintre de levage spécial.

- 1) Dans cette situation, le Luna (a) est placé le plus près possible de la sangle (b).
- 2) Le Luna (a) avec le patient est déplacé près de la porte. Dans l'autre pièce; la sangle de transfert (b) est attachée sur le deuxième anneau du LUNA (a).
- 3) Les deux sangles (a+b) sont maintenant fixées à la cassette Luna. Assurez-vous que le crochet est correctement installé.
- 4) Détendez doucement la sangle du Luna (a) jusqu'à ce que la courroie de transfert (b) supporte le poids du patient.
- 5) La sangle du LUNA (a) peut maintenant être retirée et installée sur le chariot près de la sangle de transport. Pour retirer la sangle de levage, il est préférable de soulever le support, d'appuyer sur le ressort et de retirer.

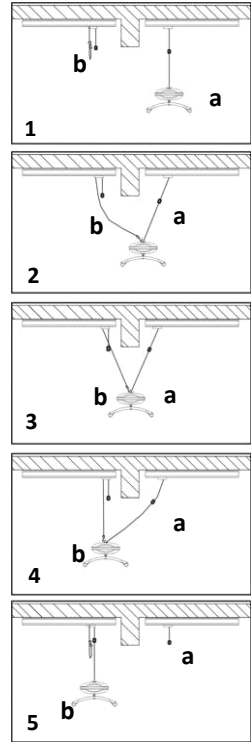

Remarque: Il peut être nécessaire d'ajuster la longueur de la courroie.

Ajustement de la longueur de la courroie

La longueur de la courroie peut être ajustée pour adapter la distance entre les rails dans les 2 pièces.

- 1) La vis est dévissée/relâchée (a).
- 2) La sangle est ajustée et le verrou (b) est placé dans la boucle correspondante (c).
- 3) Veiller à ce que la vis (a) et l'écrou (b) soient bien serrés avant de monter le LUNA sur le galet de roulement.



3.3 Utilisation du LUNA dans une pièce d'eau

Le Luna_{IPx4} et la télécommande standard peuvent être exposés à des jets d'eau. Ils sont utilisables en salle de bain sans danger. Les positions d'utilisation normales du Luna recommandées par Winncare correspondent aux figures 3.2A et 3.2C.

Il est recommandé d'utiliser le luna en position fixe directement sur le rail, selon schéma 3.2 C.



Fig. 3.2A – Correct



Fig. 3.2B – Faux



Fig. 3.2C – Correct

Remarque: La télécommande IPx4 ne doit pas être immergée dans l'eau, Winncare peut vous fournir une télécommande IPx7 adaptée à l'immersion.

4 MAINTENANCE

4.1 Nettoyage

Le Luna peut être nettoyé avec un chiffon légèrement humide et éventuellement un peu de produit nettoyant standard. Evitez les produits nettoyants contenant des produits chimiques ou abrasifs.

4.2 Stockage

Le Luna doit être stocké dans un environnement sec avec une humidité inférieure à 70%.

Remarque: Avant d'être mis en stockage, le Luna doit être entièrement chargé. Les batteries se déchargeant progressivement, il est recommandé de recharger le Luna tous les 3 mois afin d'éviter que la batterie ne se décharge.

5 VERIFICATION, GARANTIE ET SOLUTIONS AUX PROBLEMES

5.1 Vérification annuelle et Garantie

WinnCare recommande un entretien annuel conformément à la norme EN/ISO 10535 :2007. Il incombe entièrement au propriétaire du produit de veiller à l'entretien annuel. Cet entretien annuel doit être effectué par WinnCare ou par un personnel technique qualifié. En cas de remplacement de pièces, n'utilisez que des pièces de rechange WinnCare d'origine.

Des exigences particulières s'appliquent aux systèmes Luna et de piste installée dans des environnements agressifs tels que les piscines et les spas, les manèges d'équitation ou autres installations similaires.

Ici, il est nécessaire de réaliser un entretien annuel prolongé effectué par WinnCare ou par d'autres techniciens qualifiés formés par WinnCare.

Les pièces du produit endommagées par la corrosion, la déchirure ou l'usure doivent être remplacées UNIQUEMENT par des pièces de rechange WinnCare d'origine.

Pour une installation sûre et continue et afin de bénéficier d'une garantie valable, toutes les pièces porteuses doivent être remplacées tous les 5 ans UNIQUEMENT par des pièces d'origine de WinnCare.

Garantie

Il vient d'une garantie de 5 ans sur le produit. Pour plus d'informations, contactez – WinnCare.

5.2 Solutions aux problèmes

Défaut:	Cause possible	Solution
L'appareil ne réagit pas quand on appuie sur la fonction montée/descente de la télécommande. (le lève-personnes n'émet pas de signal sonore).	L'arrêt d'urgence est activé.	Désactiver l'arrêt d'urgence (voir section 2.5).
	La télécommande est défectueuse.	Contrôler le fonctionnement des boutons de montée/descente de l'appareil Luna. Si elles ne fonctionnent pas, essayer d'utiliser une autre télécommande ou d'en obtenir une neuve auprès de WinnCare.
	Les batteries sont défectueuses ou ne sont pas entièrement chargées.	Charger les batteries (voir section 2.6). Si le problème n'est pas résolu, les batteries doivent être remplacées.
Défaut:	Cause possible	Solution
L'appareil ne réagit pas quand on appuie sur la fonction montée/descente de la télécommande. (Un "bip" se fait entendre).	Le cintre n'est pas installé.	Mettez en place le cintre (voir section 2.2).
	Luna n'est pas monté dans le galet de roulement baïonnette	Lisez les instructions de montage section 2.1 pour bien monter le luna dans le rail.
	Les batteries sont déchargées.	Chargez les batteries (voir section 2.6).
	La courroie est enroulée incorrectement.	Demandez l'intervention d'un technicien.

Le Luna ne réagit pas lorsque vous appuyez sur les boutons montée/descente de la télécommande. (Le lève-personnes émet un signal sonore).	La capacité de levage est dépassée - le patient est trop lourd, la sangle est bloqué, etc.	Charger les batteries (voir section 2.6). Si le problème n'est pas résolu, les batteries doivent être remplacées
Défaut:	Cause possible	Solution
Pas de charge.	Chargeur non connecté au réseau électrique	Brancher le chargeur. (voir section 2.6).
	Défaut du chargeur.	Si un autre chargeur est disponible, essayez le, ou commandez en un nouveau
	La connexion entre la télécommande et le chargeur ne fonctionne plus.	Si un autre chargeur est disponible, essayez le, ou commandez en un nouveau.

6 DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSION

6.1 Données techniques

Capacité:	200 kg ou 275 kg selon le modèle
Longueur sangle de levage:	2200 mm. Luna SKY 2400 mm
Plage de levage:	2025 mm
Poids:	6,7 kg sans cintre. Luna SKY 7,4 kg
Dimension:	320 x 130 mm
Batteries:	36 V batteries acide (ou 24V en option)
Chargeur:	100 - 240 V, 0,5 amp.
Coque:	Moulage ABS
Bruit:	Lwa/pendant la montée descente à vide 49dB(A) Lwa/pendant la montée descente avec 175 kg est de 53dB(A)
Classe IP:	Cassette: IPx4 Chargeur: IPx4 Commande manuelle: IPx4 / IPx7 (Selon le modèle)
Sortie:	24 V (uniquement disponible dans le modèle à 2-canaux)


Testé CEM selon les normes suivantes:

Luna ou Luna SKY IPx4 200kg. 1-canal: IEC 60601-1-2: 2015


Autres modèles: IEC 60601-1-2:2007

6.2 Dimensions


Mesures pour une fixation au plafond:

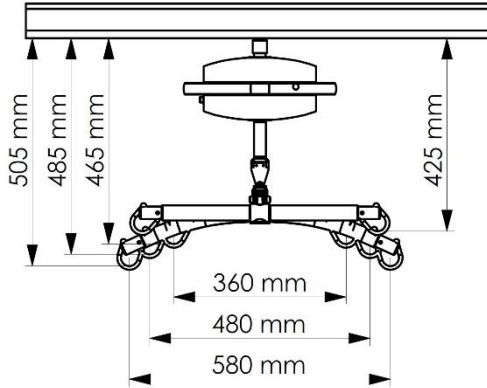

Mesures pour une fixation avec sangle:

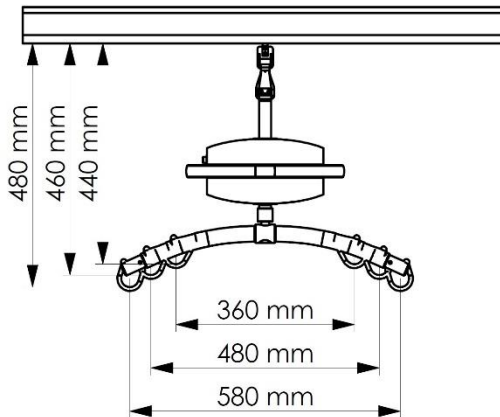

Mesures pour une fixation avec Luna SKY :

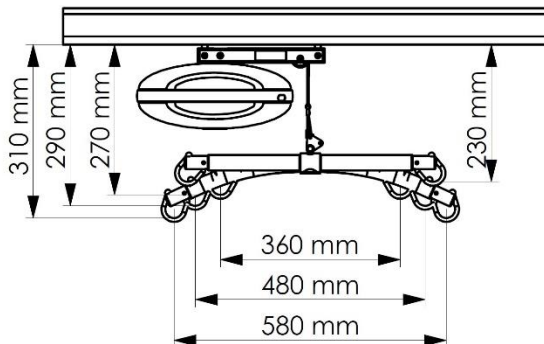

7 ENVIRONNEMENT ET QUALITE

7.1 Estimation de la durée de vie

Le dispositif Luna a une durée de vie prévue de 20 ans ou 30 000 lavages, si l'entretien annuel est effectué et s'il est conforme aux consignes du point 5.1.

7.2 Recyclage

Le LUNA peut être retourné chez Winncare pour être démonté et recyclé, et respecter ainsi l'environnement.

Les composants contenant de l'aluminium, Batteries acides, Plastique ABS, acier peuvent nuire à l'environnement.

7.3 Batterie

La batterie du Luna peut être recyclée dans une déchetterie proche ou, elle peut nous être retournée pour que nous la recyclions.

7.4 Qualité

Le fabricant, Winncare est certifié conforme à la norme de qualité ISO 9001:2015 et ISO 13485:2016.

Ces certifications signifient que les produits et l'entreprise respectent les normes internationales en matière de gestion de la qualité ainsi que les normes en matière de traçabilité des produits médicaux.

Le Luna_{IPx4/200} et Luna_{IPx4/275} est un matériel médical de classe 1.

7.5 Symboles et abréviations



Courant alternatif



Double isolation



Type B, Le patient est isolé de la terre et du châssis



Dans la mesure du possible, le produit doit être réutilisé.



Reportez-vous aux Manuel d'utilisation.

SWL

Charge maximale = (patient + harnais)

8 Accessoires

Télécommande

015-03101	Télécommande 1 fonctions, câble 1320 mm.
015-03102	Télécommande 1 fonctions, câble 1620 mm.
015-03103	Télécommande 1 fonctions, câble 1900 mm.
015-03105	Télécommande 1 fonctions, câble en haut 1320 mm.
015-03106	Télécommande 2 fonctions, câble 1320 mm.
015-03107	Télécommande 2 fonctions, câble 1620 mm.
015-03108	Télécommande 2 fonctions, câble 1900 mm
015-03109	Télécommande étanche IPx7. 1 fonctions, câble 1320 mm



Cintre standard, Luna

015-02108	Cintre - Fixation avec sangle, 36 cm
015-02110	Cintre - Fixation avec sangle, 48 cm
015-01968	Cintre - Fixation avec sangle, 58 cm
015-02122	Cintre - Fixation à baïonnette, 36 cm
015-02124	Cintre - Fixation à baïonnette, 48 cm
015-01974	Cintre - Fixation à baïonnette, 58 cm



Cintre de levage à double crochet pour un transfert d'une pièce à l'autre

015-02117	Cintre de levage à double crochet, 36 cm
015-02118	Cintre de levage à double crochet, 48 cm
015-02119	Cintre de levage à double crochet, 48 cm



Cintre 3-points

015-02104	Cintre 3-points/Fixation avec sangle
015-02106	Cintre 3-points/Fixation à baïonnette



Cintre 4-points

015-02100	Cintre 4-points/Fixation avec sangle
015-02102	Cintre 4-points/Fixation à baïonnette



Accessoires

015-02017	Chariot de transport
015-02013	Bras d'extension, 1500mm
015-02012	Bras d'extension, 1000mm
015-02010	Bras d'extension, 600mm

Une liste complète des pièces détachées est disponible. Contactez Winncare pour plus d'informations.

Attention! N'utilisez pas de câbles ou d'accessoires ne figurant pas dans la liste. En effet, ils pourraient entraver les performances de l'appareil ou provoquer des interférences.

9 Données CEM

Remarque: Données CEM valables uniquement pour le modèle Luna™ 200 kg. 1 module vendu à partir du 1/1-2020 et au-delà.

Conseils et déclaration de fabrication pour les émissions électromagnétiques			
Norme d'émission	Type	Conformité à la norme	
CISPR 11	Emissions RF	Oui, Groupe 1, Classe B	
EN/CEI6100-3-2	Émission harmonique	Sans objet. Puissance < 75W	
EN/CEI6100-3-3	Tension Fluctuations/papillotement	Oui	
Conseils d'utilisation Environnement			
Le dispositif LunalPX4 peut être utilisé aussi bien dans un environnement professionnel que dans un cadre résidentiel, notamment dans des environnements reliés au réseau public basse tension.			
Guide et déclaration d'immunité électromagnétique de fabrication			
Norme d'émission	Type	Niveau de conformité	Consignes spécifiques pour l'environnement d'application
FR/CEI61000-4-2	Décharge électrostatique (DES)	Contact ± 8 kV Jusqu'à ± 15 kV	Convient pour une utilisation sur sols en bois, en béton cellulaire ou en céramique. Maintenir l'humidité relative en dessous de 30 % en cas d'utilisation sur sols à base de matériaux synthétiques, par exemple des tapis.
FR/CEI61000-4-4-4	Transitoires et salves électriques rapides	Alimentation ± 2 kV ± 1 kV pour les lignes de signaux	Le LunalPX4 est alimenté par batterie pendant le fonctionnement de l'appareil, et la batterie interne assure donc le fonctionnement en cas de perturbations de la tension secteur.
EN/CEI61000-4-5	Surtension	± 1 kV pour les lignes de signaux	Le LunalPX4 convient à une utilisation avec un réseau de la qualité d'un réseau public basse tension alimentant un environnement domestique.
EN/CEI6100-4-11	Baisses, interruptions et variations de l'alimentation électrique d'entrée	Angles : 0 ; 45 ; 90 ; 135 ; 180 ; 225 ; 270 ; 315 degrés Cycles : Variations 0.5x, Interruptions : 10x Fréquence du réseau	Les appareils radio portables et mobiles, y compris les câbles, ne doivent pas être utilisés

EN/CEI6100-4-8	Fréquence d'alimentation champ magnétique	30 A/m 50/60 Hz	à une distance inférieure à la distance de sécurité recommandée ou à 30 cm, ou calculés à l'aide de	
EN/CEI60100-4-6	Perturbations par induction, induites par les champs RF	150 kHz à 80 MHz 3V RMS (6V ISM)	l'équation de la fréquence de transmission. Distance de sécurité recommandée : $d = 1.17 VP$ pour 80 MHz à 800 MHz MHz $d = 2.33 VP$ pour 800 MHz 2.5 GHz avec P comme puissance nominale maximale de l'émetteur watts et d	
EN/CEI6100-4-3	Champs à proximité de RF équipements de communication sans fil EN/CEI	80 MHz à 2.7 GHz, 80 % AM à 1 kHz	la distance de sécurité recommandée en mètres. Les champs magnétiques de fréquence de puissance doivent être à des niveaux typiques de l'environnement professionnel ou domestique.	
		Fréquence d'essai MHz		V/m
		385		27
		450		28
		710		9
		810		27
		1,72		28
		2,45		28
5,24	9			

Manufacturer:
Winncare Nordic ApS
Taarnborgvej 12 C
4220 Korsoer
Denmark

Téléphone: + 45 70 27 37 20
Fax: + 45 70 27 37 19
Email: info@winncare.dk
www.winncare.com

(EU) 2017/745 CLASS I
EN/ISO 10535:2007
IEC 60601-1-2:2015



UM-910-00766FR