

BORRINGIA



Scan QR koden for mere information

Skub-let

Stol

Brugermanual

Vigtig information

Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Brugermanualen henvender sig til teknikere, ergoterapeuter og andet personel, i forbindelse med brugen, servicering og vedligeholdelse af produktet.

Dato: 04-05-2017

Version: 1

Indholdsfortegnelse

1	SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	4
1.1	Tjek inden brug	4
2	UDPAKNING	5
3	MONTERING AF SKUB-LET	6
3.1	Start	6
3.2	Forreste stoleben	6
3.3	Bagerste ben træ & metal	6
3.4	Baghjul	7
3.5	Forreste ben skridsikre skiver – træstole	7
3.6	Forreste ben montering	8
3.7	Sorte elastikledninger	8
4	Gode råd og tips	9
4.1	Hvis stolen har en lav tværpind	9
4.2	Bolten til bagbenene er for kort	9
4.3	Runde stoleben/ikke- lodrette stoleben:	9
4.4	Bageste pedal	10
4.5	Skæve bageste ben	10

1 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER



Vigtig advarsel!

Denne brugermanual skal læses grundigt før produktet tages i brug:

- Brug **ALDRIG** produktet, hvis der er tegn på rust, slitage, mislyde eller løse dele. I sådanne tilfælde skal produktet tages ud af brug og en service tekniker eller forhandleren kontaktes.
- Ved brug af andre hjælpemidler sammen med produktet, skal det sikres, at der ikke opstår nogen farlige situationer.
- Det skal sikres, at hverken plejeren eller brugeren kan komme til skade under brug. Tjek altid omgivelserne og fjern forhindringer.

1.1 Tjek inden brug

Plejeren/brugeren er ansvarlig for at produktet tjekkes inden brug, samt at have modtaget instruktioner i brug af produktet.

Følgende punkter tjekkes:

- 1) Kontroller, at ingen dele mangler, og at produktet er samlet korrekt.
- 2) Kontroller produktet for mislyde, slitage eller andre defekter.

Ved tvivl omkring brugen kan Winncare Nordic ApS kontaktes for råd og vejledning.

2 UDPAKNING

Kontrollér venligst æskens indhold som skal bestå af følgende:


- 1 stk. Skub-Let m/2 stk. hjul monteret.
- 2 stk. 75 mm hjul til bagerste stoleben m/bøsninger og bolte m/skiver og møtrikker.
- 1 stk. 6,5 mm bór.
- 2 stk. sorte elastikledninger.
- 2 stk. skruer m/bøsninger.
- 2 stk. øskner.
- 2 stk. sorte gummiskiver m/skruer.



3 MONTERING AF SKUB-LET

3.1 Start

Fjern filt eller nylonbeskyttere fra bunden af stolebenene (kun træstole – ikke stole med metalben). Bøj de eksisterende bøjninger for at tilpasse rammen som vist med armene omkring 10 mm inde i benene og hjulene parallelt med baglinjen af stolen.

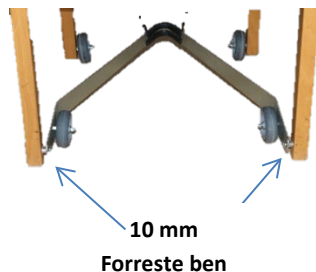


3.2 Forreste stoleben

Træstol: Bor et vandret 4 mm hul i 25 mm's dybde på indersiden af hvert af de forreste ben 35 mm over gulvet. (for lænestole se nedenfor).

Metalstol: Bor igennem stolens forreste ben med et 6,5 mm bor i 35 mm højde. Glem ikke at give mulighed for at montere gummiskiverne.

NB - for lænestole: Kontrollér at pedalhøjden er velegnet før boring! – se gode råd og tips

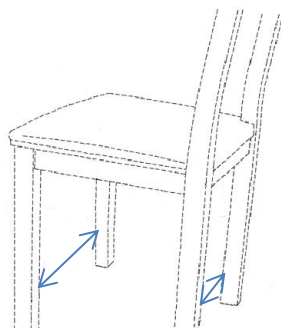

3.3 Bagerste ben træ & metal

Bor igennem de bageste ben med et 6,5 mm bor i 27 mm højde. Alle huller skal være vandrette og venstre og højre hul skal være på linje med hinanden. NB. Hvis de bageste ben er skæve, eller runde – se gode råd og tips.


Bor ét 4 mm hul – 25 mm dyb og 35 mm over gulvet på indersiden af stolebenet.

Bor med 6,5 mm bor hele vejen igennem – 27 mm over gulvet.

3.4 Baghjul

Baghjul – monter baghjulene som vist.

Placer bolten gennem hullet udefra. Monter møtrik og spændeskive og spænd dem fast. Monter hjulet, tynd bøsning & skiver plus låsemøtrikken. Spænd møtrikken uden at deformere bøsningen. Skær bolte, hvis de er for lange, og fjern evt. skarpe kanter. Kontrollér, at stolen er i "vater" på en flad overflade. Hvis ikke justeres dybden af hullerne til de forreste ben med skiver for at kompensere (eller sæt en gummiskive i, hvis det er metalben)

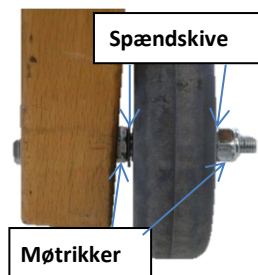

3.5 Forreste ben skridsikre skiver – træstole

Disse er kun nødvendige, når stolen skal bruges på et hårdt gulv, såsom vinyl, laminat eller træ. Et tæppe kan også hindre bevægelse. Ved eventuelle ujævnheder justeres dybden af det lille hul med gummiskiver.


Vær OMHYGGELIG med at bore et vertikalt Hul, 19 mm i diameter, ca. 2 mm op i midten af forreste ben og et pilot hul til skruen. Indsæt skiven i hullet og skru den i bunden af stolebenet indtil hovedet af skruen er forsænket lidt. Metalben (eller hvis træben er for tyndt) - brug gummiskiver. Om nødvendigt, kan ekstra gummiskiver bestilles hos os. Gummiskiverne er vitale for stolens stabilitet hvis den vippes bagfra på hårde gulve og visse tæpper.



3.6 Forreste ben montering



Træstole: Indsæt bøsningen foran rammens hul, isæt skruen og skru den fast til stolebenet.

Metal ben: fastgør rammen med bolt, spændskive og låsemøtrik som vist. Brug altid de skruer og bolte der følger med, således at rammen ikke glider ud af skrue / møtrik.

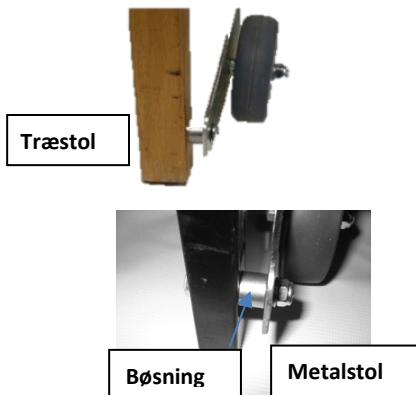

3.7 Sorte elastikledninger

Der bores passende små huller (2 mm) i undersiden af stolesædets ramme. Skru øskenen i og tråd den sorte elastikledning. Bind en dobbelt knude for at sikre den er godt fæstnet (ikke på øskenen, men som vist). Før den anden ende af ledningen gennem hullet i bagsiden af Skub-Let rammen og bind med en enkelt knude (bind ikke de to ledninger sammen). Juster knuderne således at ledningerne er lige stramme når forhjulene er lige over gulvet.

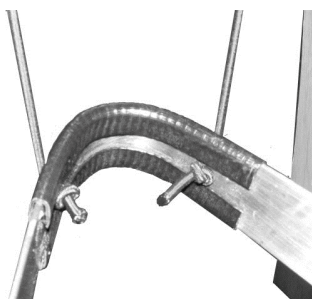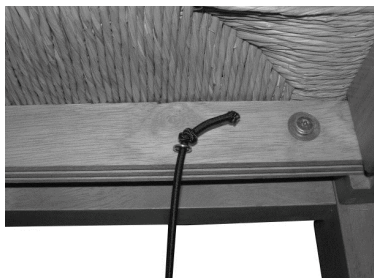

4 Gode råd og tips

4.1 Hvis stolen har en lav tværpind

Hvis tværpinden er lavere end 100 mm over gulvet - placeres Skub-Let rammen, således at man kan kontrollere (når den er monteret) at:

- a. forhjulene er lige over gulvet (brug evt. mønter under hjulene som afstandsmåler).
- b. det forreste bens løft er tilstrækkelig før pedalen rører gulvet (dvs. omkring 20 mm).

Løsning: Borehøjden skal øges til mere end 35 mm før montering. Det er måske ikke muligt at montere et Skub-Let system, hvis tværpinden er under 75 mm.



4.2 Bolten til bagbenene er for kort

Hvis stolebenene er for tykke til boltens længde, så kan man "forsænke" hullet med et 13 mm bor som

bolthovedet nedsænkes i.

Det kan være nødvendigt at bruge en skruetrækker til at holde bolthovedet når man strammer møtrikken.



4.3 Runde stoleben/ikke- lodrette stoleben:

Det første skridt er at skabe et lille fladt lodret område, hvor bøsningen skal placeres. Brug et 13 mm fladt træbor.


Det flade område laves ved at holde boret vandret, således at fladen er lodret. Dette vil tillade bøsning og baghjul at sidde vandret.

4.4 Bageste pedal

(hvis dette er påkrævet ved større stole og lænestole) - Montér bageste pedal ved hjælp af bolt, skive og Nyloc. Spænd godt, men ikke så meget at den vrider rammen. Fjern kun den sorte kant-ring om nødvendigt.

Pedaler skal bestilles separat.

Ved montering på lænestole skal stolens bageste ben være mindst (190 mm) lange.

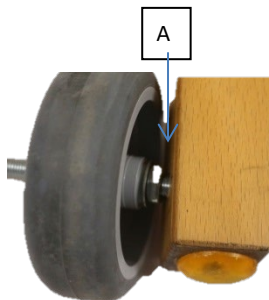

4.5 Skæve bageste ben

bor diagonalt som vist. Du kan få brug for at fjerne lidt af benet ved A for at undgå at hjulet kører på benet.

Skub-Let systemet anvendes ved at træde ned på rammens bagende, ved de sorte elastiske ledninger, så den næsten når gulvet og derefter skubbe eller trække den øverste del af stolen i ryglænet.

Den maksimale anbefalede vægt er 130 kg.

Vi håber, at du bliver tilfreds med Skub-Let systemet.



Fabrikant:
WinnCare Nordic ApS
Taarnborgvej 12 C
4220 Korsoer
Denmark

Phone: + 45 70 27 37 20
Fax: + 45 70 27 37 19
Email: info@ergolet.dk
www.ergolet.com

93/42/EØF CLASS I
EN/ISO 10535
EN 60601-1-2



UM-910-00785DK