

WINN CARE

F r a n c e

4 Le Pas du Château
85670 SAINT PAUL MONT PENIT

TEL : +33 (0)2 51 98 55 64


FAX : +33 (0)2 51 98 59 07

Email : info@medicatlantic.fr



Site Internet : <http://www.winncare.fr>

MANUEL D'UTILISATION DES BARRIERES METAL

A637-00 / A638-00
A639-00 / A640-00

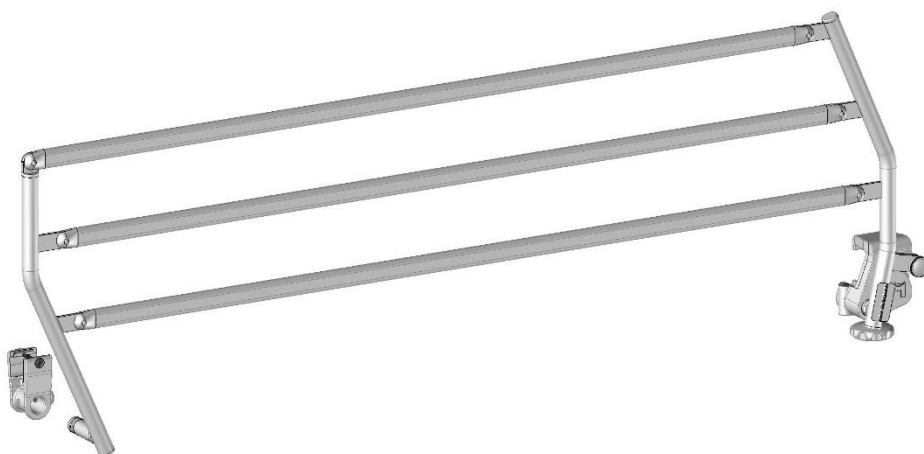

A641-00 / A642-00
A643-00 / A644-00

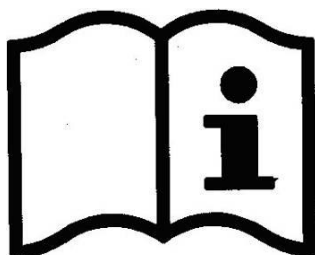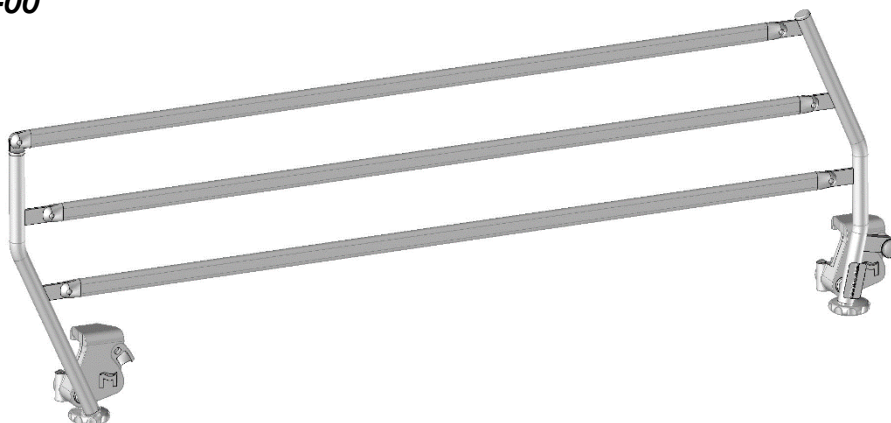

CE



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

1. CONDITIONS DE TRANSPORT	2
2. CONDITIONS DE STOCKAGE	2
3. CONDITIONS DE MONTAGE	3
3.1. MISE EN PLACE DE LA BARRIERE A637-00 / A638-00 / A639-00 / A640-00	4
3.2. MISE EN PLACE DE LA BARRIERE A641-00 / A642-00 / A643-00 / A644-00	5
4. CONDITIONS D'UTILISATION	6
4.1. FONCTION	6
4.2. PRECAUTIONS D'EMPLOI	7
4.3. RISQUES RESIDUELS	7
5. CONDITIONS DE MAINTENANCE	7
5.1. IDENTIFICATION	7
5.2. ENTRETIEN	7
5.3. NETTOYAGE	8
5.4. DESINFECTION	8
5.5. DUREE DE VIE	8
5.6. GARANTIES	8
6. CONDITIONS DE MISE AU REBUT	8

Madame, Monsieur,

Vous avez acquis un accessoire médical WINNCARE et nous vous remercions de votre confiance.

Nos lits et leurs accessoires sont conçus et fabriqués dans le respect des exigences essentielles qui leurs sont applicables selon la directive européenne 93/42/CEE et 2007/47/CE.

Ils sont testés en conformité avec la norme CEI 60601-2-52 (2009) dans leurs configurations commerciales incluant des panneaux et des accessoires de notre fabrication, afin de vous assurer une sécurité et une performance maximales.

Par conséquent, le respect des conditions d'utilisation préconisées par WINNCARE et l'utilisation de panneaux et accessoires d'origine conditionne le maintien des clauses de garantie du bien au contrat et vous assure une utilisation sécurisée du lit médical et de ses accessoires.

1. CONDITIONS DE TRANSPORT

Pendant le transport, les barrières doivent être sanglées et protégées par un emballage plastique.

ATTENTION : il est formellement interdit de gerber les colis sur les barrières.




Il est formellement interdit de gerber les colis dont le poids dépasse 60kg/m² quelle que soit leur position.

2. CONDITIONS DE STOCKAGE

Les barrières doivent être stockées à une température ambiante comprise entre -10°C et +50°C, humidité relative comprise entre 30% et 75 %

Pression atmosphérique comprise entre 700hPa et 1060hPa en respectant les mêmes conditions que pour le transport.

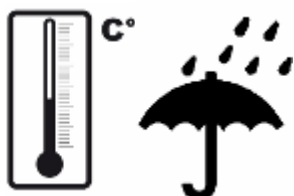


*Respecter les conditions
d'environnement spécifiées*


3. CONDITIONS DE MONTAGE

Veillez à toujours associer les barrières avec le lit conformément au tableau ci-dessous.

Référence lit	Référence barrières	Référence lit	Référence barrières
CSI80	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00	IML1L	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00
HDI100	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00	IML2L / ML2	A637-00/A638-00 A639-00/A640-00
HDI102	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00	IAL1 à IAL4	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00
HDI111	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00	IAL5L / AL5	A637-00/A638-00 A639-00/A640-00
HMI113	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00	IXN1L / XN1	A637-00/A638-00 A639-00/A640-00
I101L	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00	IXO1 à IXO2	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00
I103L	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00	IXO3L / XO3	A637-00/A638-00 A639-00/A640-00
I110L	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00	IXX1 à IXX2	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00
I111L	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00	IXX3L	A637-00/A638-00 A639-00/A640-00
I112L	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00	IXL1 à IXL3	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00
I83 / I85	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00	IXL4L	A637-00/A638-00 A639-00/A640-00
I73D	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00	IAE1L	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00
I76 / I77 / I79	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00	AE2 à AE3	A637-00/A638-00 A639-00/A640-00
I120	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00	AF1 à AF2	A637-00/A638-00 A639-00/A640-00
I140	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00	AG1	A637-00/A638-00 A639-00/A640-00
I160	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00	AH1	A637-00/A638-00 A639-00/A640-00
IXS1 à IXS3	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00	IMS1 à IMS2	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00
IEX1 à IEX4	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00	MS3 à MS4	A637-00/A638-00 A639-00/A640-00
IEX5L	A637-00/A638-00 A639-00/A640-00	IAX1L / AX1	A637-00/A638-00 A639-00/A640-00
IXP1 à IXP3	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00	IXA1L / XA1	A637-00/A638-00 A639-00/A640-00
IXP4L	A637-00/A638-00 A639-00/A640-00	IXB1L / XB1	A637-00/A638-00 A639-00/A640-00
		IDO1 à IDO4	A641-00/A642-00 A643-00/A644-00
		IDO5 à DO8	A637-00/A638-00 A639-00/A640-00

Les barrières sont prévues pour être utilisées sur des lits WINNCARE de longueur 2000 mm et ayant un cadre réalisé en tube carré de 40 mm maximum.

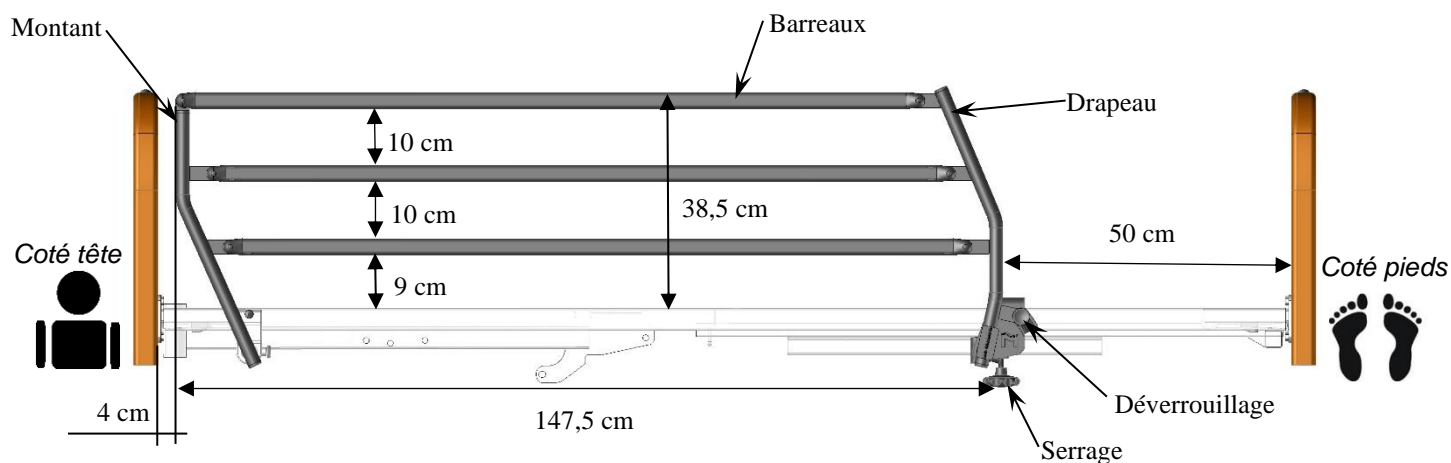


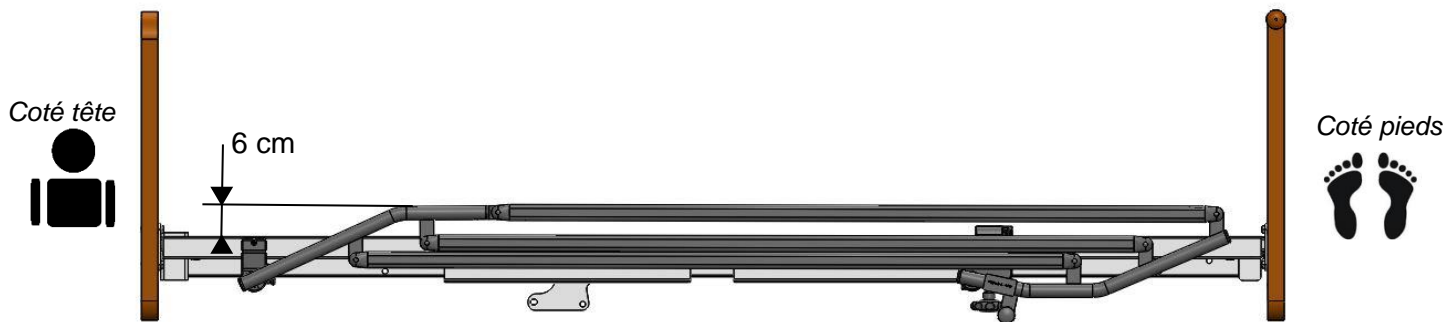


Article	Poids
A637-00 / A639-00	6 kg
A638-00 / A640-00	6 kg
A641-00 / A643-00	6,2 kg
A642-00 / A644-00	6,2 kg

3.1. Mise en place de la barrière A637-00 / A638-00 / A639-00 / A640-00

Fixer la mâchoire sur le lit si elle n'est pas déjà installée, pour cela :

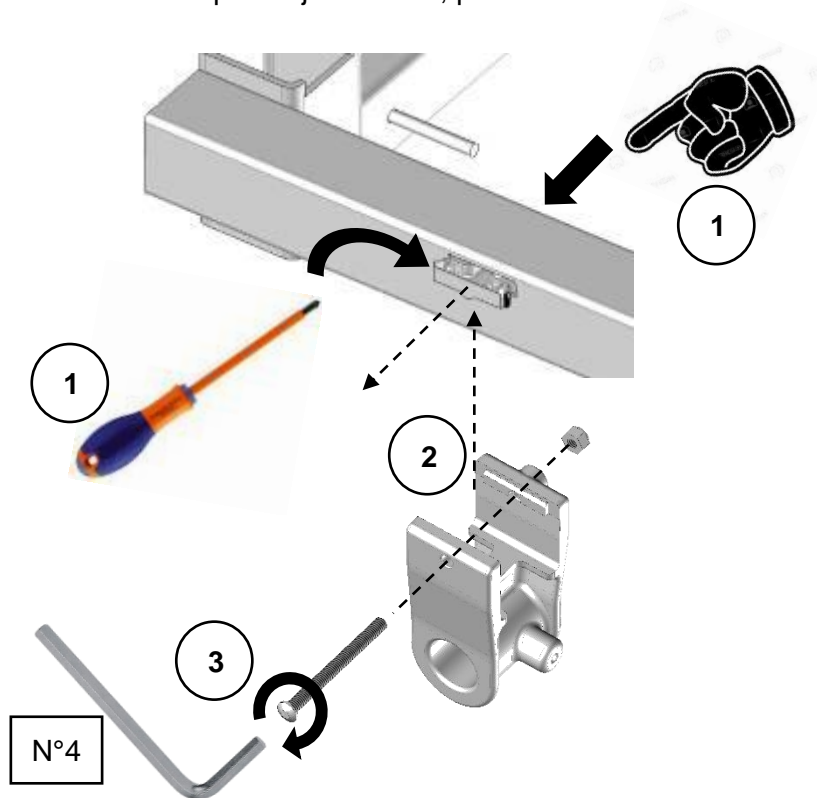


- 1 Oter le bouchon du long pan en poussant vers l'intérieur ou l'extérieur (suivant le montage) puis le sortir à l'aide d'un tournevis si nécessaire.
- 2 Clipser la mâchoire dans les fentes prévues à cet effet, en positionnant l'écrou coté intérieur du lit.
- 3 Visser la mâchoire avec la vis et l'écrou fournis à l'aide d'une clé Allen n°4.

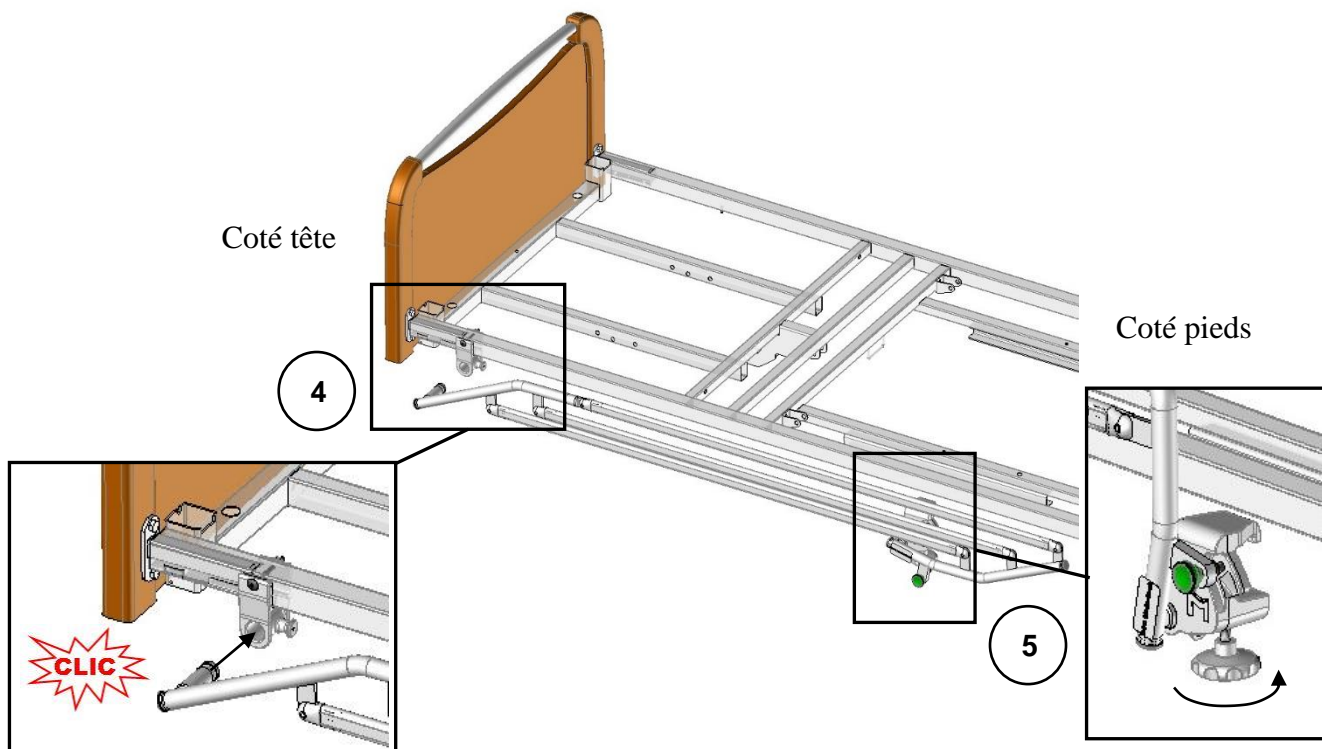

- 4 Insérer le montant de la barrière pliée dans la mâchoire coté tête fixée sur le lit jusqu'à entendre le «CLIC»
- 5 Bloquer la mâchoire coté pieds grâce au rondo de serrage sur le long pan du sommier et s'assurer de son blocage.

Pour retirer la barrière pliée, desserrer le rondo coté pieds 5 puis désengager le montant sans le retirer en tirant le doigt d'indexage sur le coté de la mâchoire coté tête 4. Prendre la barrière une main à chaque extrémité pour la retirer complètement.

3.2. Mise en place de la barrière A641-00 / A642-00 / A643-00 / A644-00

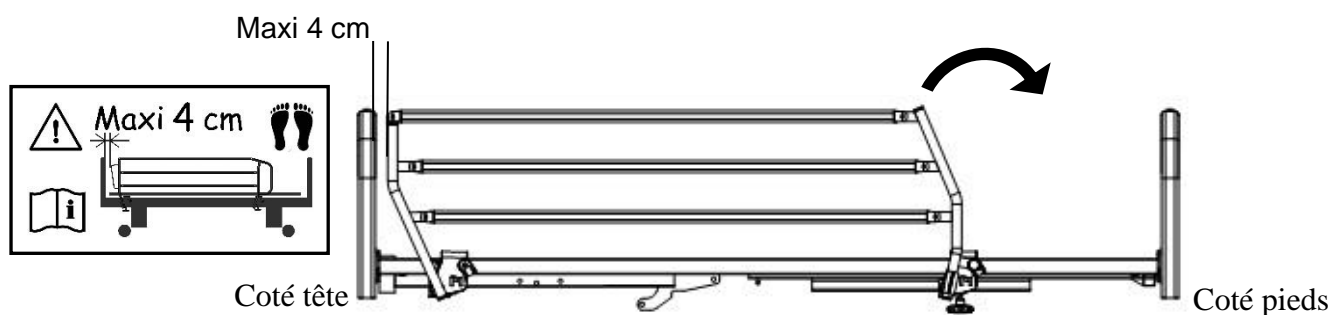

Bloquer les deux étaux grâce aux rondos de serrage sur les longs pans du sommier et s'assurer de leur blocage.

4. CONDITIONS D'UTILISATION

4.1. Fonction

Les barrières sont conçues pour éviter la chute des patients pendant leur sommeil et leur transport MAIS ne sont pas conçues pour empêcher un patient de sortir volontairement de son lit. De nombreux accidents surviennent lorsque le patient tente de sortir de son lit malgré les barrières en place.

Dans certains cas, la barrière permet d'éviter les chutes,

MAIS elle peut représenter un danger : blessures, chutes après piégeage d'un membre dans la barrière, asphyxies suite au piégeage de la tête, du cou ou du thorax. Il est souhaitable de procéder à l'évaluation du rapport bénéfice/risque de la barrière, pour décider de l'utilisation ou non des barrières.


Cette évaluation doit prendre en compte :

- les capacités de surveillance du service : Un protocole harmonisé de l'établissement d'utilisation des barrières peut être rédigé.


- l'état physique et mental du patient : ses besoins, ses capacités, sa lucidité, sa taille, son agitation.

Cette évaluation est à réitérer régulièrement.

- Pour baisser la barrière.

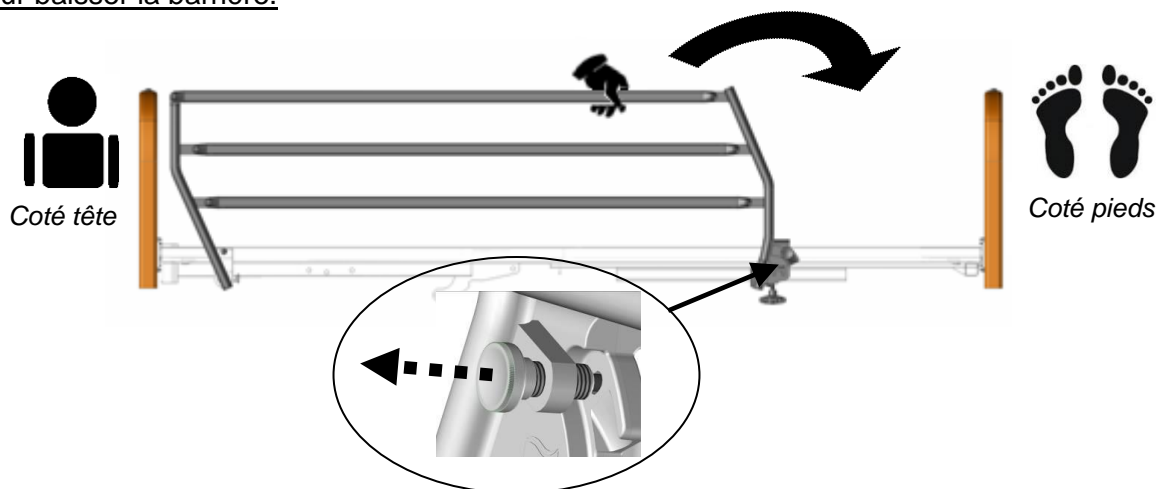

- Pour remonter la barrière.

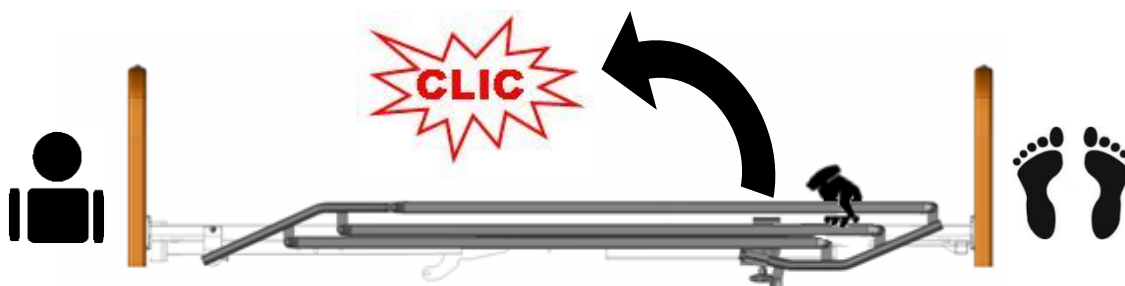

Vérifier que la barrière est bien verrouillée en essayant de la plier sans agir sur le doigt de déverrouillage

4.2. Précautions d'emploi



Un mauvais positionnement de la barrière peut être préjudiciable à la sécurité ou provoquer un dysfonctionnement. **Il est interdit d'utiliser la barrière lorsque les patients ne sont pas des adultes ou si leur morphologie est insuffisante ≤ 146 cm.**



L'utilisateur ou le personnel doit être formé et informé des risques liés à l'utilisation du lit. Il doit en interdire celle-ci par des enfants et faire preuve de vigilance lors de l'utilisation par des personnes confuses ou désorientées.



La différence entre le haut de la barrière et la surface d'un matelas non thérapeutique et non comprimé doit être d'au moins 220 mm. Il conviendra de tendre vers cette spécification dans le cas de l'usage d'un matelas thérapeutique.

L'utilisation des barrières doit se faire par une personne se trouvant à l'extérieur du lit. Elle doit s'assurer qu'aucun objet ou corps se trouve dans la zone de fonctionnement de celles-ci. Les barrières ne doivent pas être utilisées pour manipuler ou déplacer le lit médical.

La barrière est un dispositif médical, à ce titre nous vous informons qu'il ne doit en aucun cas être modifié. Vous devez assurer sa traçabilité. Si vous assemblez différents types de dispositifs médicaux, vous devez obligatoirement vérifier la conformité de l'ensemble constitué et procéder à la déclaration CE du nouveau dispositif médical.


Pour une assistance, si nécessaire, dans le montage, l'utilisation ou la maintenance ou pour signaler un fonctionnement ou des événements imprévus, appeler votre fournisseur ou **Winnicare**.

4.3. Risques résiduels

DANGER	CONSEQUENCE	PRESCRIPTION UTILISATEUR
Piégeage	Mains pincées	Manipuler la barrière par le barreau supérieur
Piégeage	Ecrasement corps ou objet	Vérifier avant de baisser la barrière que la zone de mouvement soit libre

5. CONDITIONS DE MAINTENANCE

5.1. Identification

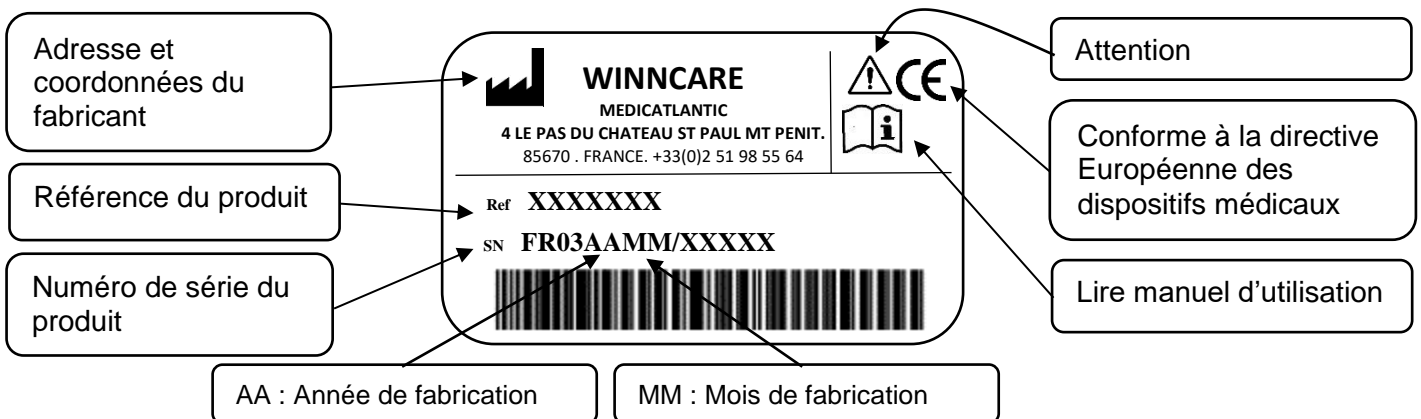

5.2. Entretien

Un examen minutieux doit être mené sur la barrière au moins une fois par an sur les éléments tels que : les rondos de serrage, les doigts d'indexage les goupilles et les rivets.

5.3. Nettoyage

Nettoyer la structure en utilisant de l'eau savonneuse avec un support doux puis rincer et essuyer. Tous les produits agressifs ou récurant tels que détergents, poudres, solvants et eau de javel sont interdits.

5.4. Désinfection

Isoler la barrière dans un local de désinfection équipé d'un système de filtration des particules et d'une évacuation pour le lavage des sols et des murs après désinfection.

Utiliser un produit désinfectant ayant des activités bactéricides, fongicides, virucides soit en pulvérisant un spray uniformément sur les surfaces ou en l'appliquant avec un linge à usage unique, soit en pulvérisant un aérosol désinfectant à une distance de 30 cm.

ATTENTION :

Respecter les précautions d'emploi des produits désinfectants indiquées sur ceux-ci.

Laisser sécher et préserver le matériel désinfecté des autres matériels non désinfectés par un film grâce à une étiquette indiquant la date de la désinfection.



Produit d'usage externe ne pas avaler, conserver à l'écart de la chaleur et éviter le contact avec les yeux

5.5. Durée de vie

La durée de vie dans des conditions normales d'utilisation et de maintenance est de 5 ans pour les accessoires, notamment les barrières latérales.

5.6. Garanties

- L'ensemble de nos fabrications sont garanties contre tout vice de fabrication, si les conditions normales d'utilisation et de maintenance sont respectées.
- Ne sont pas pris en considération les coûts de main d'œuvre, correspondant aux changements des structures ou des pièces sous garantie.
- Concernant les durées de garanties spécifiques à chaque produit, merci de vous reporter aux conditions générales de vente
- Lors de toute correspondance pour un entretien éventuel, il est impératif de nous communiquer les indications portées sur l'étiquette d'identification du lit et sur le corps du vérin, si celui-ci est concerné.
- Le remplacement s'effectue par la fourniture de pièces d'origine dans la limite de la durée de garantie par notre réseau de revente déterminant le début de la période de garantie.
- Afin de permettre une bonne application de cette garantie et aussi éviter toute facturation, le retour des pièces défectueuses est obligatoire.

6. CONDITIONS DE MISE AU REBUT

- La mise au rebut du produit s'impose si les exigences essentielles ne sont plus respectées, notamment lorsque le produit n'a plus ses caractéristiques d'origine et que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une reprise dans le processus de fabrication.
- Il faudra prendre les dispositions afin que celui-ci ne soit plus utilisable pour la fonction qui lui a été préalablement définie.
- Lors de la mise au rebut, il faudra respecter les normes environnementales du pays en vigueur.